

FICHA TÉCNICA

Ref. MPR0751

Mascarillas desechables para uso personal



BFE
EFICACIA
FILTRACION
BACTERIANA



PFE
EFICACIA
FILTRACION
PARTICULAS



MULTICAPA



ANTIBACTERIAS

Descripción

- ✓ Las mascarillas **KN95** han sido diseñadas para que, creando una zona herméticamente sellada contra la piel proporcione protección respiratoria al usuario, al crear un sello hermético contra la piel y no permitan que pasen partículas peligrosas presentes en el medio ambiente como gases, vapores, aerosoles y agentes infecciosos.
- ✓ Antes de usarlas es necesario hacer una pruebas de ajuste para asegurar que se logra un sellado adecuado a la cara. Cuando está ajustada adecuadamente y el usuario inhala, se produce una fuga mínima alrededor de los bordes del respirador. Esto significa que casi todo el aire se dirige a través de los medios de filtro asegurando así su eficacia en reducir el riesgo de *inhalar partículas peligrosas en el aire*.

Características

- ✓ Conforme a la disposición 4525 con la Orden SND/354/2020 del BOE num. 109, facilitamos a continuación la información necesaria sobre este producto:
- * Denominación usual: Mascarilla autofiltrante tipo KN95
 - * Contenido del envase: Caja de 50 unidades (5 bolsas x 10pcs)
 - * Datos de la empresa fabricante: Fujian Langtu Garments Co., Ltd.
 - * Período recomendado de uso: 8 horas
 - * Características esenciales: talla única, 1 solo uso.
 - * Mantenimiento: Este producto es No Reutilizable

Propiedades del tejido

Composición:

Capa exterior, hilado no tejido (Polipropileno).

Capa intermedia, no tejido soplado por fusión (polipropileno).

Capa interna, hilado no tejido (Polipropileno).

Gancho para la oreja: polipropileno elástico

Información Técnica del tejido

Con esta mascarilla podrás seguir las recomendaciones sanitarias españolas de uso de mascarillas durante el estado de alarma.

Cumple con Requisitos KN95 (CERTIFICACIÓN: GB 2626-2006)

BFE >95% (Eficiencia de filtración bacteriana)

PFE >95% (Eficiencia de filtración de partículas)


Indicaciones

- ✓ La mascarilla de protección está indicado para todo tipo de personas mayores de 3 años. Dispone de unas cintas elásticas para las orejas con las que se asegura un ajuste total.

FRONTAL



INTERIOR

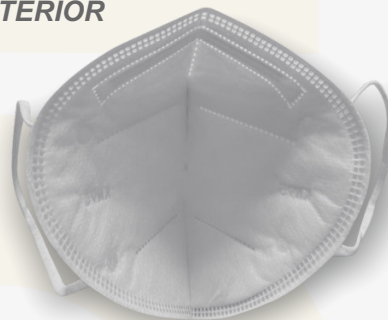

LATERAL



ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016

i Estas mascarillas no exime al usuario de la aplicación de gestos barrera complementados por las medidas de distanciamiento social que son esenciales conforme con las recomendaciones indicadas por el Ministerio de Sanidad

Colocación de la mascarilla para adultos:



1. Lavarse las manos o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.



2. Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz y sujetar el arnés a ambos lados de las orejas.



3. Ajustar la nariz y verificar que cubre la barbilla.

Durante su uso no tocar la parte frontal de la mascarilla.

Retirada de la mascarilla para adultos:

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Quitarse los guantes de protección
2. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica
3. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla
4. Desechar la mascarilla en un contenedor provisto de una bolsa de plástico preferentemente con doble bolsa, y a ser posible con tapa y control no manual.
4. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.



Duración de uso máximo continuado:

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 8h. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra.

