

FICHA TÉCNICA

Mascarilla Blanca con Ref. VDE0053 - Mascarilla Negra con Ref. VDE0054

WR.6.003

Mascarillas higiénicas ERGONOMICA reutilizables para adultos

Mascarillas reutilizable para uso personal

FABRICADO EN ESPAÑA



PACK '10'
MASCARILLAS



Blanco 00



Negro 99

**APTO PARA
ESTAMPACION**



EFICACIA DE FILTRACION:
(BFE) > 94.16%
RESPIRABILIDAD: 19 Pa/cm²



ACABADO QUÍMICO
HIDRÓFUGO



TEJIDO DE FILTRACIÓN
DE UNA CAPA



PRESTACIONES
GARANTIZAS
TRAS 10 CICLOS
DE LAVADO A 60°



TEJIDO CUMPLE
ESPECIFICACION
UNE 0065:2020

Frimisal Distribuciones, S.L.

Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)
C/ La Ventilla, 37 - 41620 Marchena (Sevilla)

Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es
<http://www.frimisal.com>

WR.6.003 Mascarillas higiénicas Ergonomica reutilizables

Tejido cumple con especificación UNE 0065:2020

Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos.

Descripción

- ✓ Mascarilla higiénica reutilizable, fabricada en tejido que cumple con la norma UNE0065:2020.
- ✓ Una sola capa de alta filtración en 80%poliéster/20%poliamida e hidrófugo.
- ✓ Totalmente ergonómica, cubre la nariz, la boca y la barbilla y está fabricada con un material reutilizable filtrante adecuado que permite la respiración.
- ✓ Fabricado en España.
- ✓ Sujeción a las orejas mediante dos bandas elásticas en los laterales.
- ✓ Reduce el riesgo de contaminación e infección.
- ✓ Disponible en color blanco y negro.

Características

- ✓ Talla única recomendada para uso en adultos.
- ✓ Se adapta y cubre perfectamente la superficie de la cara a proteger.
- ✓ Sujeción a la cabeza mediante dos bandas elásticas de 20cm situadas en los dos extremos, superior e inferior.

Propiedades del tejido

- ✓ Tejido autorizado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
- ✓ Ligamento plana de 126 gr/m²
- ✓ 80%poliéster/20%poliamida transpirable e hidrófugo que repele el agua y las microgotas.
- ✓ Apto para la estampación (testado por el organismo notificado nº0161)
- ✓ Prestaciones garantizadas tras 10 ciclos de lavado a 60º.
- ✓ Material de las bandas elásticas: 55% Poliéster / 45% Latex.
- ✓ Respetuoso con el medio ambiente.

Información Técnica del tejido

- ✓ Tejido ensayado por Aitex con Nº Informe de Ensayo: 2020TM1000
- ✓ Resumen de los resultados sobre los requisitos de funcionamiento en base a la norma EN 14683:2019 + AC:2019 de mascarillas quirúrgicas puntos 5.2.2, 5.2.3, y 5.2.4:

	RESULTADOS (Promedio +/- DS)
Eficacia de filtración bacteriana (BFE), (%) <small>Ensayado según apartado 5.2.2 de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019</small>	94.16 +/- 2.45
Respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm ²) <small>Ensayado según apartado 5.2.3 de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019</small>	19 +/- 1

Resultados después de 5 lavados

Indicaciones

- ✓ La mascarilla higiénica está destinada a adultos sin síntomas que no sean susceptibles de utilizar mascarillas quirúrgicas ni máscaras filtrantes de protección contra partículas.



ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016

Frimisal Distribuciones, S.L.

Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)

C/ La Ventilla, 37 - 41620 Marchena (Sevilla)

Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es

<http://www.frimisal.com>

i La mascarilla higiénica no exime al usuario de la aplicación de gestos barrera complementados por las medidas de distanciamiento social que son esenciales conforme con las recomendaciones indicadas por el Ministerio de Sanidad

Colocación de la mascarilla para adultos:



1. Lavarse las manos o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.



2. Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz y sujetar el arnés a ambos lados de las orejas.



3. Ajustar la nariz y verificar que cubre la barbilla.

Retirada de la mascarilla para adultos:

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Quitarse los guantes de protección
2. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica
3. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla
4. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

Limpieza, desinfección y secado:

Para la limpieza y desinfección de mascarillas higiénicas reutilizables, se podrán seguir cualquiera de los métodos siguientes:



1. Lavado y desinfección de las mascarillas con detergente normal y agua a temperatura de 60° (Ciclo normal de lavadora).



2. Sumergir las mascarillas en una dilución de lejía 1:50 con agua tibia durante 30 minutos. Después lavar con agua y jabón y aclarar bien para eliminar cualquier resto de lejía y dejar secar.

- ✓ Se debe evitar el contacto entre una mascarilla sucia y la ropa limpia.
- ✓ No se deben utilizar productos que puedan degradar o dañar los materiales y que disminuyan su capacidad protectora.
- ✓ Se recomienda que la mascarilla se seque completamente dentro de las 2 h posteriores al lavado.
- ✓ No se debe secar o higienizar con un horno microondas.
- ✓ Tanto durante el secado, como en el almacenaje posterior, se deben evitar los ambientes en los que la mascarilla se pueda volver a contaminar.
- ✓ Después de cada ciclo de lavado, se debe realizar una inspección visual (con guantes de protección o manos lavadas). Si se detecta algún daño en la mascarilla (menor ajuste, deformación, desgaste, etc.), se debe desechar la mascarilla.

Eliminación de la mascarilla:



Para reducir los riesgos del uso de estas mascarillas, una vez superado el número máximo de lavados se debe desechar. Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico o en los contenedores para desechos biológicos.

Duración de uso máximo continuado:

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 h. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra.